

 Lea todas las instrucciones antes de usar.

En esta guía encontrará toda la información necesaria para llevar a cabo la recogida de saliva y preparar el kit para su envío a Dreamgenics.

 **RECUERDE QUE NO DEBE COMER, BEBER, FUMAR, LIMPIARSE LOS DIENTES NI MASCAR CHICLE EN LOS 30 MINUTOS PREVIOS A LA TOMA DE MUESTRA.**

### Antes de iniciar la recogida:

Compruebe que el líquido contenido en el interior del tubo esté en 1 mL antes de abrir. Este líquido sirve para preservar correctamente su saliva.

### Uso indicado

Recolección de saliva para aislamiento de ADN humano.

### Almacenamiento

Si no va a realizar la recogida de muestra de manera inmediata, almacene este kit a temperatura ambiente (15-30°C).

### Precauciones de uso

No ingerir. Si el líquido entra en contacto con piel u ojos, lavar con abundante agua.


La tapa del tubo puede ser peligrosa para niños pequeños por riesgo de asfixia.

### Contacto


☎ 985 088 180 – 613 031 849

@ [genetica@dreamgenics.com](mailto:genetica@dreamgenics.com)

🕒 Lunes a viernes de 8:00 a 15:00

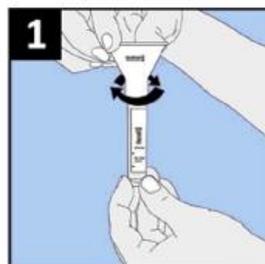

1. Remueva la tapa del tubo, guardándolo para su posterior uso. Ponga el embudo en el tubo y enrósquelo con cuidado de no apretar demasiado.

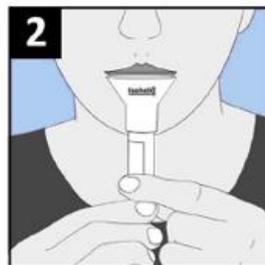


2. Escupa en el embudo hasta que el nivel llegue a la línea que marca 2 ml, **sin contar las burbujas.**

\*Si la saliva no baja fácilmente, desenrosque ligeramente el embudo.



3. Quite el embudo y ponga el tapón. El embudo ya no es necesario.

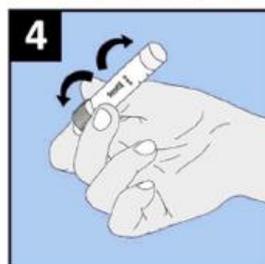

4. Invierta el tubo varias veces para mezclar la saliva con el líquido del interior. Guarde el tubo de nuevo en la caja del kit e introdúzcala en el sobre blanco.

**ENVÍO:** Una vez finalizado el proceso de recogida debe llamar a MRW al teléfono 985 088 888 y solicitar una recogida con destino Dreamgenics (**cód. abonado 2003 franquicia 03007**). Este envío NO tiene ningún coste para usted.

Solicite la recogida de lunes a jueves. Evite realizar envíos los viernes y vísperas de festivo.